

VISIÈRE DE PROTECTION

AJUSTABLE - CONFORTABLE - LAVABLE

Code article : 59VISIER

Descriptif :

Visière de protection pour les professionnels de santé qui sont en première ligne face à l'épidémie du COVID-19.

Pour vous **protéger des projections**, cet équipement est composé d'une **visière** et d'un **serre-tête en mousse Plastazote®** pour vous assurer un confort optimal.

Conditionnement : carton de 100
Fabrication Française



Photo non contractuelle

Avantages : Protection optimale des projections

- ↯ Mousse Plastazote® compatible aux applications médicales (ISO 10993-1)
- ↯ Visière flexible et facile à monter (aucune colle pour assembler le produit)
- ↯ Forme ergonomique, ajustable au tour de tête
- ↯ Confort grâce à la souplesse de la mousse et à la légèreté du produit (<20 grammes)
- ↯ Grand spectre visuel, anti-buée
- ↯ Produit lavable et désinfectable
- ↯ Compatible avec le port de lunettes de vue



De nombreux secteurs d'activités concernés :

- Personnel de santé
- Agents administratifs
- Salariés de l'industrie
- Salariés de la grande distribution
- Transporteurs / livreurs Commerçants
- Mais aussi toutes les entreprises souhaitant apporter une solution de protection à leurs salariés.

1/2

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES est à votre disposition pour d'autres informations.

www.bbaemballages.com

Procédure de montage : Visière CoVid-19

Cette visière a été conçue pour être opérationnelle rapidement grâce à un montage facile. Le seul équipement nécessaire à l'assemblage est une paire de ciseaux.

Le produit vous est livré en 2 pièces :

- Une pièce de mousse Plastazote® compatible aux applications médicales (ISO : 10-993-1)
- Une visière transparente

1) Emplacement de la visière :



Insérer la visière dans la fente prévue à cet effet (en rouge). Laissez la feuille dépasser légèrement de la mousse (+/- 1 cm).

2) Blocage de la visière :



Avec une paire de ciseau, faites une petite découpe de la visière et repliez cette pate afin de bloquer la visière (cf photo ci-dessus).

3) Mise en place de la visière :



Positionnez le serre-tête sur votre front. Des points d'attaches peuvent être déchirés si vous devez élargir le tour de tête (cf zone rouge ci-dessus).

